

# APARAT ULTRASONIC - JIMJAMS

JIMJ-016 (JJ3031)

## MANUAL DE UTILIZARE



**SC EMERIGOS SRL**

**410219 Oradea, Bihor, România**  
**Blv. Decebal nr. 124. Tel: +40-770-106-403**

## **Stimate Client!**

Vă mulțumim că ați ales produsele Emerigos SRL – SisiCosmetice.

Sperăm că aparatul ales va fi un ajutor prețios în munca zilnică, iar prin funcționarea lui permanentă și performantă va contribui la succesul salonului de cosmetică pe care îl conduceți.

Aparatul cumpărat a fost realizat doar pentru folosirea de către personal autorizat. Utilizarea lui necesită pregătire de cosmetician.

Întrebuințarea de către alți consumatori este strict interzisă!

Cu ajutorul informațiilor incluse în manualul de întrebuințare puteți face cunoștință cu aparatul achiziționat, respectiv vă puteți însuși utilizarea lui corectă.

Manualul de întrebuințare nu substituie pregătire profesională de cosmetician!

Firma nu își asumă răspunderea pentru daunele cauzate de neluarea în seamă a atenționărilor din manualul de întrebuințare în cazul utilizării necorespunzătoare sau datorită folosirii de către personal neautorizat. Cu orice întrebare privitoare la opțiunile de utilizare căutați serviciul relații cu publicul al firmei Emerigos SRL – SisiCosmetice.

## **INTODUCEREA SUBSTANȚELOR ACTIVE ȘI TRATAREA RIDURILOR**

Ultrasunetele pot pătrunde la o adâncime de mai mulți milimetri, chiar centimetri în țesuturi. Stimulează puterea de absorbție a acestora prin afânarea stratului cornos de la suprafață. Cremele, gelurile aplicate pe piele se absorb cu ușurință și hidratează țesuturile și fibrele de colagen, care la rândul lor au efect de netezire a pielii. După efectuarea tratamentului cu ultrasunete, puterea de absorbție a pielii rămâne mare timp de o oră, asigurând astfel pătrunderea celorlalte substanțe active aplicate ulterior. Aparatul asigură introducerea substanțelor active și umplerea ridurilor prin pulsare. Vezi: descrierea părților componente, punerea în funcțiune a aparatului.

### **Când folosim această metodă?**

- În cazul tenului uscat, a ridurilor fine sau mai adânci.

## **ÎNTINERIREA PIELII**

Datorită ultrasunetelor, particulele țesuturilor pielii produc căldură prin mișcarea lor de. Astfel venele și arterele se dilată, intensificându-se circulația sanguină. Crește conținutul de substanțe nutritive și oxigen a celulelor, astfel se îmbunătățește procesul de regenerare a acestora. Se intensifică deasemenea circulația limfatică, accelerând procesul de eliminare a noxelor. Întinerirea și revigorarea este asigurată de funcționarea permanentă a aparatului. Vezi: descrierea părților componente, punerea în funcțiune a aparatului.

### **Când folosim acest regim de funcționare?**

- În cazul unui ten lipsit de elasticitate, decolorat.

## **TRATAMENT MULTIPLY**

Cu ajutorul aparatului JimJams Beauty Ultrasonic se pot folosi simultan cele două metode. În acest caz, pe lângă introducerea substanțelor active și umplerea ridurilor, aparatul revigorează funcțiile pielii, asigură substanțele nutritive și sângele necesar țesuturilor.

### **Când folosim această metodă?**

- Atunci, când tenul are nevoie de regenerare completă și pe lângă hidratare, este nevoie și de revigorarea funcțiilor sale.

## **ATENȚIE! Nu se utilizează aparatul cu ultrasunete în următoarele locuri și cazuri:**


- Deasupra inimii
- În cazul în care clientul are un Pacemaker
- Tâmples
- Zona ochilor
- Locuri cu varice
- Sâni
- Locuri cu inflamații
- Tumori
- Răni
- Locuri osoase
- Anomalii ale sistemului nervos
- Gravide
- Anomalii ale circulației sanguine

## DESPACHETAREA APARATULUI

Înainte de despachetarea aparatului, convingeți-vă că ambalajul este intact. Deteriorarea cutiei poate cauza deteriorarea aparatului, motiv pentru care acesta va funcționa în mod defectuos. În cazul în care aparatul sau adaptorul atașat sunt deteriorate, contactați neapărat service-ul nostru. Este INTERZISĂ folosirea aparatului sau adaptorului deteriorat.

## DESCRIERE:

- Buton de pornire-oprire
- Buton cu 3 poziții indicat de poziția luminii verzi.
- Buton cu 3 poziții pentru selectarea regimului de funcționare, (permanent, pulsant, multiply), indicat de lumina roșie intermitentă
- Lumină roșie ce indică starea de funcționare și regimul actual de funcționare (permanent, pulsant, multiply)
- Ledul verde pentru indicarea puterii de bază
- Al doilea led verde pentru putere medie
- Al treilea led verde pentru putere mare
- Suport pentru conectarea adaptorului

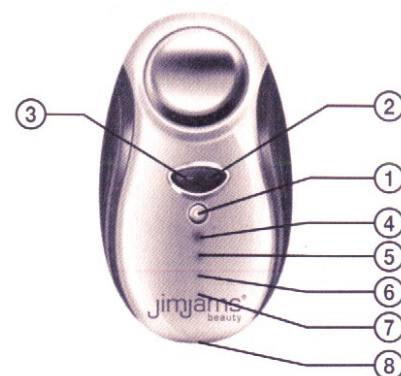

## CONECTAREA APARATULUI LA REȚEA

Aparatul JimJams Beauty Ultrasonic se livrează cu cablu de conectare și adaptor. Înainte de folosire, aparatul se va conecta la rețeaua de 230 V cu ajutorul adaptorului. După fixare verificați de fiecare dată dacă aparatul este funcțional și dacă funcționează conform instrucțiunilor. Aparatul conectat incorect la rețea funcționează defectuos.



## PUNEREA ÎN FUNCȚIUNE A APARATULUI:

1. Conectați adaptorul aparatului la rețeaua de 230 V.
2. Conectați adaptorul deja conectat la rețea la aparat. Punctul 8.
3. Porniți aparatul prin apăsarea butonului 1.

Funcționarea este indicată de ledul roșu (funcționare continuă) și ledul verde (putere mică).

**ATENȚIE!** Aparatul emite imediat după pornire ultrasunete, deci se începe tratamentul în cel mai scurt timp. Dacă uitați aparatul pornit, acesta se poate defecta datorită suprîncălzirii capului și pentru această defecțiune firma noastră nu-și asumă nicio răspundere.

Datorită faptului că tratamentul cu ultrasunete nu produce nici vibrații, nici electrizare, funcționarea aparatului se poate verifica prin mișcarea unei picături de apă picurată pe aparat.

Alegeți regimul de funcționare dorit prin apăsarea repetată a butonului 3.

**Introducerea substanțelor active și umplerea ridurilor:** prin pulsare, indicat de ledul roșu cu lumină intermitentă.

**Întinerirea pielii:** regim de funcționare permanent indicat de ledul roșu cu lumină intermitentă continuă.

**TRATAMENT MULTIPLY:** Se efectuează simultan introducerea substanțelor active, umplerea ridurilor și revigorarea funcțiilor pielii. Regimul ales este indicat de lumina roșie continuă, care apoi devine intermitentă.

- Alegeți puterea potrivită tratamentului efectuat. Prin apăsarea repetată a butonului 2 puteți alege între putere mică, medie sau mare, indicată de alternarea luminii verzi. Intensitatea puterii este indicată de temperatura capului aparatului.
- Oprirea tratamentului și decuplarea aparatului se face prin apăsarea butonului 1. Aparatul rămâne în funcțiune și continuă să emită unde cu ultrasunete până în momentul opririi cu butonul 1 (buton de pornire-oprire).

### TEHNICA FOLOSITĂ

Veți executa mișcări circulare cu aparatul. Aveți grijă să nu zăboviți prea mult într-un loc. Aparatul trebuie să fie în mișcare pe tot parcursul tratamentului, iar capul trebuie să se suprapună perfect pe piele. Aveți grijă ca intensitatea să fie mai mică în locurile osoase (frunte, os zigomatic, bărbie).

### ETAPELE TRATAMENTULUI

Curățați pielea cu gel spumant de curățare JimJams Beauty (nu este inclus în pachet. Puneți o cantitate cât o alună din gel în palma umedă și aplicați-l făcând mișcări circulare, curățând astfel fața, clătiți apoi cu apă caldă.

Pentru tratamentul cu ultrasunete folosiți Gelul activ cu lipozomi JimJams Beauty, care conține miere și acid hialuronic, hidratând datorită acestora pielea în mod spectaculos. Pe fața curățată se aplică o loțiune tonică, după care se aplică gelul în strat de 3-4 mm și se începe tratamentul cu aparatul cu ultrasunete, efectuând mișcări conform desenului aproximativ 8 minute. Dacă gelul este absorbit mai repede, se va aplica un nou strat. Dacă rămâne gel după terminarea tratamentului, masați-l ușor, apoi aplicați crema hidratantă de zi JimJams Beauty bogată în vitamina A, C și E.

### DIRECȚII DE MIȘCARE



### INTRODUCERE SUBSTANȚE ACTIVE ȘI UMPLEREA RIDURILOR



### ÎNTINERIREA PIELII

## INSTRUCȚIUNI PENTRU SIGURANȚĂ

**Măsurile de securitate de bază trebuie respectate întotdeauna când folosim un aparat electric, mai ales dacă avem în preajmă copii.**

**Folosiți aparatul numai conform destinației, respectiv conform prezentelor instrucțiuni de folosire.**

**Citiți cu atenție instrucțiunile de siguranță înainte de folosirea aparatului!**

**ATENȚIE!** Pungile de polietilenă în care este ambalat aparatul sau ambalajul acestuia pot fi periculoase. Păstrați-le departe de sugari și copii.

Nu le folosiți în leagăn, în pătuțuri, în cărucioare sau țarcuri pentru copii. Folia subțire se poate lipi de nas și gură, împiedicând respirația. Punga nu este o jucărie.

**ATENȚIE!** Nu folosiți aparatul deasupra chiuvetei, a vâinii sau a dușului sau deasupra altui vas ce conține apă sau în apropierea acestora. Mențineți aparatul perfect uscat.

- Dacă folosiți aparatul în baie, aveți grijă să-l scoateți din priză după folosire. Apropierea sursei de apă poate fi periculoasă chiar dacă aparatul este deconectat.
- Nu introduceți aparatul în apă sau alte lichide. Folosiți doar adaptorul atașat.
- Nu folosiți aparatul dacă adaptorul sau ștecărul a căzut sau dacă sunt urme vizibile de deteriorare, în acest caz acesta trebuie schimbat de o persoană cu pregătire de specialitate pentru evitarea pericolelor.
- Nu folosiți aparatul dacă are urme vizibile de deteriorare.
- Nu lăsați aparatul nesupravegheat dacă acesta este conectat la rețeaua electrică sau dacă este în funcțiune.
- Deconectați-l imediat dacă se ivesc probleme în timpul folosirii.
- Folosiți numai accesoriile recomandate de JimJams Beauty.
- Scoateți aparatul din priză după folosire și înainte de a-l curăța.
- Nu țineți aparatul conectat timp îndelungat.
- Nu acoperiți niciodată aparatul și nu-l așezați pe suprafețe moi, cum ar fi patul sau canapeaua!
- Acest aparat nu a fost produs pentru a fi folosit de persoane cu dizabilități fizice, senzoriale sau intelectuale sau persoane fără experiență sau fără cunoștințe (copii), exceptând cazul când aceste persoane folosesc aparatul sub supravegherea persoanei responsabile de siguranța lor sau urmând întocmai instrucțiunile de folosire. Aveți grijă să nu se joace copiii cu aparatul!
- Pentru a evita deteriorarea șnurului electric, nu-l răsuciți în jurul aparatului și aveți grijă să nu se răsucescă în timpul depozitării.
- Conectați aparatul doar în prize perfecte!
- Aparatul corespunde standardelor 04/108/UE (compatibilitate electromagnetă) și 04/108/UE (siguranța aparatelor electrice de uz casnic).

**APARATE ELECTRICE ȘI ELECTRONICE DUPĂ EXPIRAREA DURATEI DE VIAȚĂ**

În scopul participării active la protecția mediului și a noastră a tuturor:

- Nu aruncați aceste produse împreună cu gunoiul menajer.
- Apelați la punctele de colectare.

Unele materiale sunt reciclabile.

**ACUMULATOARE ÎNCĂRCABILE ȘI REFOLOSIREA BATERIILOR**

Înainte de a arunca aparatul, scoateți din el bateriile și acumulatele și predați-le la punctele de colectare. Verificați ca acestea să fie complet descărcate. Pentru informații în acest sens adresați-vă JimJams Beauty.

**IMPORTANT!**

- Aparatul JimJams Beauty Ultrasonic poate fi folosit doar pentru introducerea substanțelor active, umplerea ridurilor și revitalizare, conform instrucțiunilor de folosire.
- Nu efectuați tratamente cu aparatul sub ochi, în jurul ochilor și pe tâmpile.
- Nu efectuați tratamente cu aparatul pe răni deschise, tăieturi, pe cicatrice nu mai vechi de 3 luni, pe arsuri, negi, alunițe, pe pielea arsă de soare sau cu varice.
- Nu efectuați tratamente cu aparatul pe porțiuni de piele inflamate, cum ar fi psoriazis sau eczemă.
- Nu efectuați tratamente cu aparatul deasupra sânilor, inimii sau ovarelor.

**MENTENANȚĂ ȘI REPARAȚII**

- Dezinfectați capul metalic cu soluție cu alcool după fiecare folosire.
- Aveți grijă ca aparatul să nu ajungă în apă.
- Curățați aparatul cu o cârpă moale îmbibată cu soluție de curățat.

**DATE TEHNICE:**

- Tensiune nominală: **220-240V – 50/60 Hz**
- Frecvență ultrasunete: **1 MHz**
- Putere efectivă: **0-0,8W/cm<sup>2</sup>**

GRAD DE PROTECȚIE: II.

**CONȚINUTUL CUTIEI:**

- Aparat JimJams Beauty Ultrasonic: **1 buc.**
- Adaptor: **1 buc.**